

Vorgehensweise:

1. Die Farbscheiben anhand der entsprechenden Laschen am Ende aufklappen.
2. Schutzfolie abziehen.
3. Versuchen Sie, die Farbe gemäß nachstehender Anleitung zu bestimmen.

Farbbestimmung mit Seekey

Die rote Scheibe (mit runden Ecken) nahe an das eine Auge halten und das andere schließen. Schauen Sie nun auf das rote Feld des **Farbschlüssels**. Das Feld erscheint Ihnen sehr hell, nahezu weiß.

Schauen Sie anschließend mit derselben Scheibe auf das grüne Feld. Es erscheint recht dunkel. Mit der grünen Scheibe erzielen Sie einen umgekehrten Effekt. Nun wissen Sie, wie Sie zwischen Rot und Grün unterscheiden können.

Mit Hilfe der übrigen Farbfelder erlernen Sie rasch andere Farben, die schwer zuseheiden sind, zu unterscheiden. Üben Sie ruhig auch an anderen Gegenständen, deren Farben Ihnen bekannt sind. Wenn Sie kein Blau sehen oder nur Grautöne, ist es schwierig alle Farben sicher zu bestimmen. Dennoch entdecken Sie plötzlich Dinge, die Ihnen bisher verborgen blieben. Mehr darüber unter **Mehr sehen**.

Mehr sehen

Mit Seekey entdecken Sie Dinge, die Sie früher nicht gesehen haben. Zwischen den grünen Blättern verbergen sich oft rote Blumen oder Beeren. Schauen Sie durch die rote, abgerundete Scheibe. Das Rot erscheint Ihnen fast leuchtend gegenüber dem dunkleren grünen Umfeld. Versuchen Sie es mit Landkarten, Bildern oder gemusterten Kleidungsstücken.

Oft ist es gut, die beiden Scheiben Kante an Kante nebeneinander zu stellen. Bewegen Sie dann Seekey, so dass Sie abwechselnd durch die rote und die grüne Scheibe sehen. Dinge mit verschiedenen Farben zeigen oft einen Blinkereffekt und lassen sich leicht erkennen.

Pflegeanleitung

Seekey ist beständig gegen Witterungseinflüsse und Wasser. Die Scheiben lassen sich mit Spülmittel, Petroleum oder verdünntem Spiritus reinigen. Mit trockenem Baumwollappen abtrocknen. Vermeiden Sie Kratzerbildung. Kleine Kratzer lassen sich mit Poliermittel für Acrylkunststoff entfernen.



Bei Anwendung von Seekey wird die Farbempfindung auf dreierlei Arten beeinflusst. Die Farbe erscheint:

- Wesentlich **dunkler**
- Wesentlich **heller**
- Nahezu **unverändert** oder vielleicht ein wenig dunkler/heller

Am deutlichsten ist der Effekt von Seekey bei Rot, Grün, Blau und Lila. Braun und Grau fordern oft mehr Übung.

Farbschlüssel

	Empfinden mit der roten Scheibe	Empfinden mit der grünen Scheibe
Rot	Heller	Dunkler
Grün	Dunkler	Unverändert
Orange	Heller	Dunkler
Braun	Unverändert	Unverändert

	Empfinden mit der roten Scheibe	Empfinden mit der grünen Scheibe
Blau	Dunkler	Unverändert
Lila	Heller	Unverändert
Blaugrün	Dunkler	Unverändert
Rosa	Heller	Dunkler
Grau	Unverändert	Unverändert

Sehr helle oder sehr dunkle Nuancen sind schwieriger zu bestimmen. Stellen Sie die Scheiben mit einem kleinen Zwischenspalt ein. Schauen Sie abwechselnd durch eine der Scheiben und den farblosen Spalt, um kleine Veränderungen leichter zu erkennen.

Auch bei schwachem Licht ist es schwieriger, Farben zu sehen. Das gilt aber auch für all diejenigen, die Farben sehen können. „In der Nacht sind schließlich alle Katzen grau“.

ZU BEACHTEN: Die Anwendung von Seekey erfolgt auf eigene Gefahr. Üben Sie entsprechend dieser Anleitung. Prüfen Sie in sicherheitsrelevanten Situationen Ihre Farbauslegung besonders sorgfältig. Bitten Sie im Zweifelsfall um Hilfe.